



## Procedura di decontaminazione dei dispositivi non canalizzati e termosensibili

STEP	ISTRUZIONI
	Indossare i guanti protettivi
	Prendere la <b>Salvietta Detergente</b> per pulire accuratamente il dispositivo, rimuovendo tutto il materiale organico prima della disinfezione sporicida. 
	Gettare la salvietta nei rifiuti ospedalieri
	Prendere la <b>Salvietta Sterilizzante</b> e il flacone identificato come " <b>Schiuma di Attivazione</b> ". Stendere la salvietta sulla mano 
	Premere <b>2 dosi</b> della Schiuma di Attivazione sulla Salvietta. Nota: quando il flacone viene usato per la prima volta occorre premere il pulsante di erogazione dalle 2 alle 4 volte per caricare la schiuma.
	Comprimerne la salvietta nella mano per <b>15</b> secondi finché ne è completamente imbevuta di schiuma.
	Strofinare tutta la superficie del dispositivo assicurandosi che venga in contatto con la salvietta almeno una volta. Attendere <b>30</b> secondi
	Gettare la salvietta nei rifiuti ospedalieri
	Prendere la <b>Salvietta Risciacquante</b> , strofinare accuratamente il dispositivo per eliminare accuratamente eventuali residui chimici 
	Gettare la salvietta nei rifiuti ospedalieri
	Compilare il Registro di Tracciabilità per confermare l'effettuazione della procedura di decontaminazione