

Tristel

Duo



SCHIUMA SPORICIDA DISINFETTANTE

per

SONDE ECOGRAFICHE



Una schiuma sporicida disinfettante per sonde ecografiche

Tristel Duo per Ecografia è una schiuma disinfettante efficace contro tutti i tipi di microrganismi, spore comprese, in un unico e rapido tempo di contatto. La schiuma è composta di diossido di cloro brevettato Tristel che garantisce la rapida esecuzione della disinfezione in modo sicuro per la salute dell'operatore ed è anche perfettamente compatibile con i materiali presenti negli strumenti.

Il vasto spettro del ClO₂ Tristel lo rende adatto per tutti i tipi di sonda ecografica, sia le sonde cutanee che le sonde invasive. La schiuma è infatti efficace contro tutti i tipi di patogeni potenzialmente reperibili sulle sonde, compresi quelli più a rischio tipo l'HPV, in soli 30 secondi. Sonde transvaginali e transrettali richiedono la disinfezione ad alto livello dopo la rimozione del guanto protettivo utilizzato durante la visita al paziente, per assicurare il corretto livello di igiene per il paziente successivo.

Al termine della visita la sonda deve essere pulita e viene quindi applicata una dose di schiuma direttamente sullo strumento oppure sulla Salvietta Asciutta Tristel. Si consigliano due dosi per gli strumenti più grandi. La schiuma viene stesa in modo uniforme sullo strumento, assicurandosi che tutta la superficie ne venga in contatto e poi lasciata agire per 30 secondi. Alla fine del tempo di contatto, lo strumento viene risciacquato ed è pronto per il riutilizzo sul paziente successivo. Le caratteristiche di Tristel Duo permettono un ricondizionamento completo ed effettivo dello strumento tra una visita e l'altra senza perdite di tempo né rallentamenti dei ritmi di lavoro.



La Salvietta Asciutta Tristel agevola ed accresce le prestazioni di Tristel Duo durante la disinfezione della sonda, permettendo un rilascio efficace di tutta la schiuma sullo strumento senza assorbirne alcunché. La salvietta è realizzata in TNT con ridottissimo rilascio di residui di fibra sulla superficie trattata. La salvietta è adatta anche per la rimozione di gel e dello sporco visibile, prima della disinfezione.



Tristel Duo per Ecografia è un dispositivo medico classe IIb, marchiata CE, in conformità alle Direttive Europee 93/42/CEE e i suoi emendamenti 2007/47/CE.