






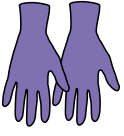


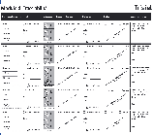


GUIDA AL TRATTAMENTO COMPLETO DEGLI ENDOSCOPI ORL

STEP	AZIONE
	Lavare le mani e indossare i guanti.
1	Salvietta Detergente: per rimuovere tutto lo sporco e il materiale organico visibile
	Stendere la salvietta sul palmo della mano: strofinare prima l'impugnatura dello strumento. Ristendere la salvietta sul palmo della mano e strofinarla delicatamente lungo il tubo di inserimento, dall'alto verso il basso.
	Gettare la salvietta usata e i guanti nei rifiuti clinici. Indossare nuovi guanti.
2	Salvietta Sporicida Disinfettante: per la disinfezione ad alto livello dello strumento
	Lavare le mani e indossare i guanti. Prendere la salvietta e il flacone etichettato "Schiuma di Attivazione". Stendere la salvietta sul palmo della mano.
	Applicare 4 dosi della Schiuma di Attivazione sulla salvietta. Nota: quando il flacone viene usato per la prima volta occorre premere il pulsante di erogazione dalle 2 alle 4 volte per caricare la schiuma
	Comprimere la salvietta nella mano per 15 secondi finché questa risulti completamente imbevuta di schiuma. Il leggero odore proveniente dalla salvietta, simile al cloro, conferma l'avvenuta attivazione e che la salvietta è pronta all'uso.
	Stenderla sul palmo della mano e strofinarla delicatamente prima lungo il tubo di inserimento, dall'alto verso il basso, punta compresa, poi l'impugnatura. Dopo essersi assicurati che tutte le parti siano venute a contatto con la salvietta almeno una volta, posare lo strumento su un'area pulita e lasciare agire la schiuma per 30 secondi .
	Gettare la salvietta usata e i guanti nei rifiuti clinici. Indossare nuovi guanti.
3	Salvietta Risciacquante: per rimuovere e neutralizzare eventuali residui chimici
	Stendere la salvietta sul palmo della mano. Strofinarla accuratamente e delicatamente lungo tutta la superficie dello strumento.
	Gettare la salvietta usata e i guanti nei rifiuti clinici.
4	Modulo di tracciabilità: per registrare ogni trattamento dello strumento
	Compilare il modulo di tracciabilità per confermare che il trattamento è stato eseguito in modo corretto, utilizzando le etichette e i dettagli sul retro della busta delle salviette.