










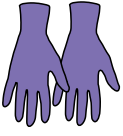

GUIDA AL TRATTAMENTO COMPLETO DEGLI ENDOSCOPI ORL

| STEP | AZIONE |
|---|---|
|  | Lavare le mani e indossare i guanti. |
| 1 | Salvietta Detergente: per rimuovere tutto lo sporco e il materiale organico visibile |
|  | Stendere la salvietta sul palmo della mano: strofinare prima l'impugnatura dello strumento. Ristendere la salvietta sul palmo della mano e strofinarla delicatamente lungo il tubo di inserimento, dall'alto verso il basso. |
|  | Gettare la salvietta usata e i guanti nei rifiuti clinici. Indossare nuovi guanti. |
| 2 | Salvietta Sporicida Disinfettante: per la disinfezione ad alto livello dello strumento |
|  | Lavare le mani e indossare i guanti. Prendere la salvietta e il flacone etichettato "Schiuma di Attivazione". Stendere la salvietta sul palmo della mano. |
|  | Applicare 2 dosi della Schiuma di Attivazione sulla salvietta. Nota: quando il flacone viene usato per la prima volta occorre premere il pulsante di erogazione dalle 2 alle 4 volte per caricare la schiuma |
|  | Comprimere la salvietta nella mano per 15 secondi finché questa risulti completamente imbevuta di schiuma. Il leggero odore proveniente dalla salvietta, simile al cloro, conferma l'avvenuta attivazione e che la salvietta è pronta all'uso. |
|  | Stenderla sul palmo della mano e strofinarla delicatamente prima lungo il tubo di inserimento, dall'alto verso il basso, punta compresa, poi l'impugnatura. Dopo essersi assicurati che tutte le parti siano venute a contatto con la salvietta almeno una volta, posare lo strumento su un'area pulita e lasciare agire la schiuma per 30 secondi . |
|  | Gettare la salvietta usata e i guanti nei rifiuti clinici. Indossare nuovi guanti. |
| 3 | Salvietta Risciacquante: per rimuovere e neutralizzare eventuali residui chimici |
|  | Stendere la salvietta sul palmo della mano. Strofinarla accuratamente e delicatamente lungo tutta la superficie dello strumento. |
|  | Gettare la salvietta usata e i guanti nei rifiuti clinici. |
| 4 | Modulo di tracciabilità: per registrare ogni trattamento dello strumento |
|  | Compilare il modulo di tracciabilità per confermare che il trattamento è stato eseguito in modo corretto, utilizzando le etichette e i dettagli sul retro della busta delle salviette. |